



ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
Sanaflex Anatomic
Κυπρου 93, Athens, 164 51



A-125 Περικάρπιο / Wrist Support

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

One Size
(S - XL)

GR | Ελληνικά

A-125, Περικάρπιο

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Τενοντίτιδες, αρθροπάθεια καρπού, πόνος, αστάθεια, επακόλουθα τραυματισμών, προληπτικά.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Περάστε τον αντίχειρα μέσα από την οπή. Τυλίξτε τη δέστρα γύρω από τον καρπό και ασφαλίστε με το velcro, προσαρμόζοντας την ασκούμενη πίεση στις ανάγκες σας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε αλλεργικός/η σε κάποιο από τα συστατικά του. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πλύσιμο στο χέρι σε νερό στους 30°C με ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά, μην σίβετε, αφήστε να στεγνώσει, μη σιδερώνετε.

Σύνθεση

80% Neoprene, 20% Nylon
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex



EN | English

A-125, Wrist Support

INSTRUCTION MANUAL

INDICATIONS

Stabilization of the wrist provides relief from the pain and improves blood flow to the soft tissue areas. Comfortable fit allows normal daily function. Wrist injuries, irritative conditions, osteoarthritis of the wrist, tenosynovitis

FIT

Insert your thumb through the hole. Wrap the bandage around the wrist and secure it, adapting the pressure to your needs.

CAUTIONS

Do not use the product if you are allergic to one of its components. In case of any irritation occurrence, discontinue the use of the product and seek medical advice.

CARE AND MAINTENANCE

Hand wash in warm soapy water (maximum 30°C). Dry flat, away from sources of excessive heat (radiator, tumble dryer).

Material Composition

80% Neoprene, 20% Nylon
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex

