



ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
Sanaflex Anatomic
Κυπρου 93, Athens, 164 51



A-137
Επιστραγαλίδο / Ankle Strap

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

One Size
(S - XL)

GR | Ελληνικά

A-137, Επιστραγαλίδο


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Κακώσεις τενόντων ή συνδέσμων της ποδοκνημικής. Ήπιοι τραυματισμοί στην περιοχή του αστραγάλου που συνοδεύονται από πόνο, αστάθεια και κατάλοιπα προηγούμενου τραυματισμού. Προληπτικά κατά τη διάρκεια αθλητικών και καθημερινών δραστηριοτήτων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθετήστε την πτέρνα στο λεπτό ελαστικό τμήμα, όπως στην πρώτη εικόνα. Περάστε τον ιμάντα γύρω από το πόδι και τέλος περιστρέψτε τον ιμάντα γύρω από τον αστράγαλο. Ασφαλίστε με το Velcro.

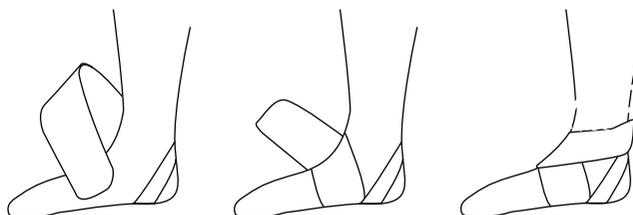

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε αλλεργικός/η σε κάποιο από τα συστατικά του. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πλύσιμο στο χέρι σε νερό στους 30°C με ήπιο σαπούνι ή απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά, μην στίβετε, αφήστε να στεγνώσει, μη σιδερώνετε.

Σύνθεση

80% Neoprene, 20% Nylon
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex



EN | English

A-137, Ankle Strap


INSTRUCTION MANUAL

INDICATIONS

Minor injury, pain, instability, after – effects of injury, prevention during work and sport.

FIT

Insert the heel into the thin rubber section as shown in the first illustration. Pass the strap around the foot and finally rotate the strap around the ankle. Secure with Velcro.

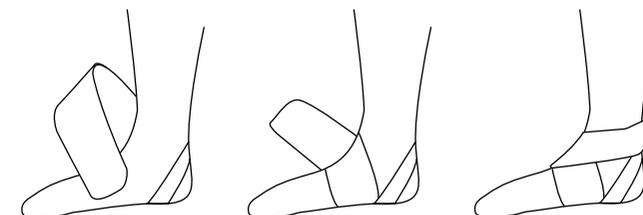

CAUTIONS

Do not use the product if you are allergic to one of its components. In case of any irritation occurrence, discontinue the use of the product and seek medical advice.

CARE AND MAINTENANCE

Hand wash in warm soapy water (maximum 30°C). Dry flat, away from sources of excessive heat (radiator, tumble dryer).

Material Composition

80% Neoprene, 20% Nylon
Spacer Fabric: 45% Polyester, 55% Spandex

